

Découvrez vos forces.

Libérez-vous de la spasticité
et des troubles associés grâce
à la *Exopulse Mollii Suit*

Appuyez Start et découvrez les possibilités.

Sur simple pression d'un bouton, l'*Exopulse Mollii Suit* vous permet de mieux gérer les symptômes de la spasticité - une condition généralement causée par la paralysie cérébrale, la sclérose en plaques (SEP) ou d'autres maladies neurologiques.

La spasticité se produit lorsque les signaux des nerfs vers les muscles sont perturbés, ce qui provoque, ce qui les fait se contracter, se tordre et se gripper. Ces symptômes peuvent affecter de nombreuses parties du corps, mais se manifestent généralement dans les bras et les jambes, ce qui rend difficile les mouvements, la marche et la participation à de nombreuses activités quotidiennes.

Il existe plusieurs traitements pour combattre la spasticité, notamment la physiothérapie, les médicaments oraux et injectables et la chirurgie.

L' *Exopulse Mollii Suit* fonctionne différemment. L'*Exopulse Mollii Suit* est un appareil qui soutient le corps entier. L'*Exopulse Mollii Suit* est conçu pour détendre les muscles tendus et spastiques et soulager les douleurs associées.

À qui s'adresse l'*Exopulse Mollii Suit* ?

L' *Exopulse Mollii Suit* est un dispositif médical d'assistance destiné aux enfants et aux adultes qui souffrent de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques ou d'autres troubles neurologiques tels qu'un accident vasculaire cérébral et qui, de ce fait, souffrent de spasmes et de douleurs connexes. Il est recommandé d'utiliser cet appareil tous les deux jours - sauf prescription contraire d'un professionnel de la santé - en association avec la physiothérapie et l'entraînement à la mobilité.



Comment l'*Exopulse Mollii Suit* aide-t-il les personnes souffrant de spasticité ?

La spasticité et vos muscles

Les muscles de votre corps sont regroupés de manière à ce qu'ils puissent s'équilibrer, se contrôler et s'opposer aux mouvements des autres. La spasticité perturbe la façon dont ces groupes travaillent ensemble. Elle resserre les muscles affectés tout en affaiblissant les autres, immobilisant souvent l'ensemble du groupe.

L' *Exopulse Mollii Suit* est conçu pour rétablir l'équilibre normal et sain des groupes de muscles dans tout le corps. Pour ce faire, il utilise une technique bien connue appelée "neuromodulation" : une méthode qui aide le corps à bouger plus librement en modifiant (ou en "modulant") le comportement des nerfs musculaires.

Des résultats en 60 minutes


L'*Exopulse Mollii Suit* est conçu pour apporter un soulagement rapide des symptômes de la spasticité. Après une heure, vous verrez les premiers résultats.

Approche personnalisée


Le schéma de stimulation innovant de l'*Exopulse Mollii Suit* peut être personnalisé pour apporter exactement le soulagement dont vous avez besoin.

La neuromodulation avec l'*Exopulse Mollii Suit*

Il existe plusieurs formes différentes de neuromodulation. L'*Exopulse Mollii Suit* utilise une forme basée sur la stimulation douce des groupes de muscles affectés par des signaux électriques. Il a été démontré que cette approche permet de réinitialiser les signaux musculaires perturbés par la spasticité et de resynchroniser les groupes musculaires qui ont cessé de travailler ensemble comme ils le devaient.

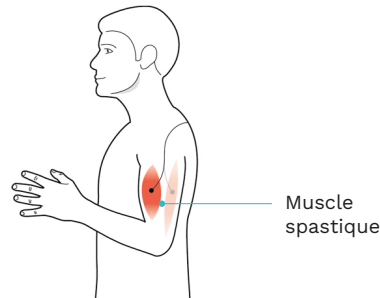

L'*Exopulse Mollii Suit* contient 58 électrodes qui envoient des impulsions douces et à peine perceptibles aux muscles tendus et spastiques, ainsi qu'aux muscles affaiblis qui les contrebalancent habituellement. Ces impulsions libèrent les muscles tendus et réactivent les muscles faibles, rétablissant ainsi l'équilibre naturel du groupe et aidant le corps à se mouvoir à nouveau comme il le devrait.

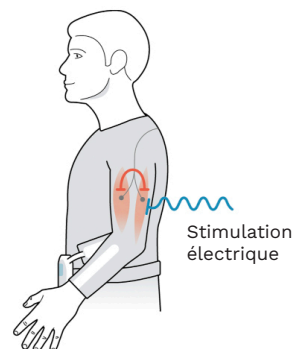

Un design innovant et portable pour tout le corps.

L'Exopulse Mollii Suit est un dispositif avancé conçu pour vous aider à mieux gérer votre spasticité - de manière cohérente, confortable et facile.



L'Exopulse Mollii Suit

- **Composants :** La Suit est composée de deux pièces de vêtements, une veste et un pantalon. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles pour les enfants et les adultes.
- **Tissu et coupe confortables :** La veste et le pantalon sont faciles à enfiler et à porter pour les utilisateurs. Ils sont fabriqués à partir d'un tissu synthétique robuste et respirant et ne contiennent aucun produit ou fibre d'origine animale.
- **Prêts à être lavés :** Les deux vêtements (sans l'unité de commande) peuvent être nettoyés jusqu'à 25 fois dans un lave-linge domestique, ou illimité dans une armoire à vapeur.
- **Tailles disponibles :** L'Exopulse Mollii Suit est disponible en 37 tailles, allant de la taille enfant à 5XL et ce pour les hommes et les femmes.

Technologie

- **58 électrodes intégrées :** Placées dans l'ensemble de la veste et du pantalon, ces coussinets d'e-stimulation peuvent apporter un soulagement ciblé aux groupes musculaires de tout le corps.
- **Unité de contrôle détachable :** Le schéma de stimulation personnalisable de l'Exopulse Mollii Suit est contrôlé directement à partir de ce hub, facilement accessible pour une utilisation à domicile et facile à retirer lorsqu'il est temps de nettoyer l'Exopulse Mollii Suit*.

*L'unité de commande n'est pas lavable. Retirez toujours l'unité de commande avant de laver les vêtements. Le lavage de l'unité de commande peut annuler la garantie de deux ans.

Comment la suit les a aidés à découvrir leurs forces.*

Michele était sur le point de terminer un diplôme universitaire lorsque ses symptômes de tétraparésie dystonique ont commencé à s'aggraver. Bientôt, il s'est retrouvé à lutter pour bouger, marcher et rester en contact avec ses amis, sa famille et sa communauté. Il savait qu'il était temps d'adopter une nouvelle approche.

Sa famille a trouvé le cadeau de fin d'études idéal : l' *Exopulse Mollii Suit*. Michele a ressenti un soulagement presque immédiat et n'a jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, même la tétraparésie dystonique ne fait pas le poids face à la confiance, à l'énergie et à la positivité que l'*Exopulse Mollii Suit* lui permet de sentir. Son plus grand bonheur : embrassant à nouveau ses proches !



Scannez pour voir l'histoire de Michele.

*Les témoignages, déclarations et opinions présentés dans les vidéos ne s'appliquent qu'aux personnes représentées. Les témoignages ne sont pas représentatifs de l'expérience de tous les patients. Les résultats exacts et l'expérience seront uniques et individuels pour chaque patient. Les utilisateurs représentés dans les vidéos ont reçu une compensation pour le temps passé à filmer avec Ottobock.

”
*Je peux donner les
meilleurs câlins du monde.*

Michele,
paralysie cérébrale

Plus d'informations sur l'Exopulse Mollii Suit.

L'Exopulse Mollii Suit a-t-il des effets secondaires ?

Les patients portant l'Exopulse Mollii Suit ont rarement ressenti des effets secondaires légers et temporaires liés à la stimulation qu'ils reçoivent.

Puis-je l'associer à d'autres traitements ?

Dans la plupart des cas, oui, mais consultez toujours votre médecin pour vous assurer que cela est approprié pour vous ou le membre de votre famille. Avec l'accord de votre médecin, l'Exopulse Mollii Suit devrait idéalement être utilisé en combinaison avec une physiothérapie, un entraînement ou une activité physique. Discutez de la combinaison avec votre médecin si vous ou votre proche recevez actuellement des injections de toxine botulique ou si on vous a prescrit des médicaments par voie orale contre la spasticité. N'utilisez pas l'Exopulse Mollii Suit si vous ou un membre de votre famille portez un dispositif médical implanté.

Comment dois-je entretenir l'Exopulse Mollii Suit ? Peut-il être lavé en machine ?

La veste et le pantalon (pas l'unité de commande) sont lavables en machine jusqu'à 25 fois à 40°C/104°F. Ils peuvent également être nettoyés dans une cabine à vapeur aussi souvent que nécessaire. L'unité de commande ne doit PAS être placée dans une machine à laver ou une cabine à vapeur. Cela annulerait la garantie de deux ans.

Attention

N'utilisez pas le Exopulse Mollii Suit :

- Si vous avez des dispositifs médicaux électroniques implantés ou des équipements qui peuvent être perturbés par des aimants (par exemple, des shunts).
- En même temps qu'un équipement électronique de maintien en vie ou un équipement de fonctionnement à haute fréquence.
- En même temps qu'un équipement d'électrocardiogramme.

l'Exopulse Mollii Suit peut potentiellement perturber le fonctionnement des types d'équipements mentionnés ci-dessus. Toute utilisation incorrecte est aux risques et périls de l'utilisateur.

N'utilisez pas l' Exopulse Mollii Suit sans consulter un médecin dans le cadre de :

- Épilepsie
- Maladies cardiovasculaires
- Malignité (cancer)
- Maladies infectieuses
- Fièvre
- La grossesse
- Maladie de la peau, éruptions cutanées ou autres problèmes de peau.
- Un autre dispositif médical ou traitement médical.

Entretien et maintenance



Lavable en machine

La veste et le pantalon peuvent être nettoyés jusqu'à 25 fois dans un lave-linge domestique, ou régulièrement dans une cabine à vapeur.



Eau chaude uniquement

Ne nettoyez pas la veste et le pantalon à l'eau froide ou bouillante.



Ne pas laver l'unité de commande

Cela peut annuler la garantie de deux ans du suit.

Contactez-nous pour l'essayer.

Prêt pour l'*Exopulse Mollii Suit* ? Demandez un test sans obligation à l'adresse exopulse@vigogroup.eu

Notification : Les informations contenues dans ce document sont uniquement destinées à un public situé en dehors des États-Unis. Ce produit n'a pas été répertorié, autorisé ou approuvé par la FDA. Tous les produits et services ne sont pas enregistrés ou disponibles à la vente dans tous les pays.

VIGO
Biezeweg 13
9230 Wetteren
www.vigogroup.eu

contact VIGO
Jelle van Durm
Exopulse@vigogroup.eu