



## Steunzolen

### tips en onderhoud

bijskutter | 2020

**Uw steunzolen<sup>(1)</sup>.** Nieuwe steunzolen moeten altijd een beetje wennen. Loop daarom uw nieuwe steunzolen geleidelijk aan in. Dit zal uw comfort alleen maar bevorderen.

**Corrigeren, ondersteunen of ontlasten?** Via steunzolen kan je voeten corrigeren, ondersteunen of bepaalde delen juist ontlasten van druk. Een evenwicht vinden tussen correctie en de juiste ondersteuning vereist specifieke vakkennis.

Steunzolen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en verschillende soorten materialen. De keuze die gemaakt wordt voor u is afhankelijk van de klachten die er zijn en het resultaat dat men wil bereiken.

**Onderhoud en hygiëne** Enkele verzorgingstips voor uw steunzolen:

- **Algemeen** Haal elke avond de zolen uit uw schoen en laat ze drogen. Indien uw steunzolen gaan geuren, kunt u ze best 24u (verpakt in een plasticzakje) in de diepvriezer bewaren. Op die manier worden de bacteriën, die de geur veroorzaken, gedood en verdwijnt de geur.
- **Kurk-leder** Behandel preventief de boven- en onderzijde met een voedende ledercrème, zodat het leder soepel blijft en de zolen langer meegaan. Laat de zolen niet drogen op de verwarming, daarvan gaan ze kapot! Indien de bekleding toch beschadigd is, kan die vernieuwd worden.
- **Zachte kunststoffen** Steek nooit uw steunzolen in de wasmachine, maar reinig ze in lauw water met PH-neutrale zeep. Indien vroegtijdig slijtage optreedt door intens gebruik, kan de bekleding vernieuwd worden.

**Hernieuwing met terugbetaling** Voor mensen jonger dan 18 jaar is hernieuwing van de steunzolen met terugbetaling mogelijk na 1 jaar. Nadien is vernieuwing met terugbetaling mogelijk elke 2 jaar. Uiteraard kunt u op elk moment nieuwe zolen aanvragen of een tweede (extra) paar laten maken.

**Terugbetalingsvoorwaarden** Er is een gedeeltelijke terugbetaling als de gebruiker een voorschrift heeft van een behandelend specialist geneesheer<sup>(2)</sup>, in orde is met zijn/haar verzekering en er binnen de wettelijke hernieuwingstermijn geen ander soortgelijk apparaat werd geleverd.

<sup>(1)</sup> Deze steunzolen zijn niet geschikt voor in veiligheidsschoenen. Indien u gecertificeerde zolen wenst, kunnen we die voor u maken. Informeer hiervoor bij uw zorgverstreker of contacteer ons via mail, dan doen wij het nodige.

<sup>(2)</sup> Bevoegd specialist geneesheer in de orthopedie, de fysische geneeskunde en revalidatie, pediatrie, reumatologie, neurologie, chirurgie en neuropsychiatrie.



## Semelles

conseils pratiques et conseils d'entretien

dépliant | 2020

**Vos semelles<sup>(1)</sup>.** De nouvelles semelles doivent toujours un peu s'adapter à votre pied. Il vous est donc recommandé de les utiliser progressivement, ce qui favorisera votre confort.

**Corriger, soutenir ou soulager?** Les semelles orthopédiques peuvent corriger et soutenir le pied, ou soulager certaines parties du pied. Les semelles sont disponibles en différents modèles et différents types de matériaux. Le choix dépendra des plaintes et du résultat souhaité.

### Entretien et hygiène

Voici quelques conseils de soin pour vos semelles:

- **En général** Retirez tous les soirs les semelles de vos chaussures et laissez-les sécher. Au cas où vos semelles dégagent une odeur persistante, mettez-les dans le congélateur (emballées dans un sachet) pendant 24h. De cette façon les bactéries, responsables de l'odeur, mourront et l'odeur disparaîtra.
- **Liège-cuir** Traitez préventivement le haut et le bas des semelles avec une crème nourrissante pour le cuir, de sorte que le cuir reste souple. Ne laissez jamais sécher les semelles sur le chauffage, elles casseraient! Si le revêtement est endommagé, il peut être renouvelé.
- **Plastique souple** Ne mettez jamais les semelles dans la machine à laver, mais nettoyez-les à l'eau tiède et avec un savon au PH-neutre. En cas d'usure précoce suite à une utilisation intensive, le revêtement peut être renouvelé.

**Renouvellement avec intervention mutuelle** Pour les enfants de moins de 18 ans, le renouvellement des semelles avec remboursement mutuelle est possible après un délai d'un an. Ensuite le remboursement mutuelle est accepté tous les 2 ans. Naturellement vous pouvez à n'importe quel moment demander la réalisation d'une deuxième paire (extra) à votre charge.

**Conditions de remboursement** Un remboursement partiel est possible si l'utilisateur fournit une prescription d'un médecin spécialiste<sup>(2)</sup>, s'il est en ordre avec son assurabilité et qu'aucun autre dispositif similaire n'a été livré dans le délai de renouvellement statutaire.

<sup>(1)</sup> Les semelles ne conviennent pas aux chaussures de sécurité. Si vous souhaitez des semelles certifiées, nous pouvons vous les fournir. Informez-vous auprès de votre prestataire de soins ou contactez-nous par e-mail afin d'obtenir de plus amples informations.

<sup>(2)</sup> Un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine physique et réadaptation, en pédiatrie, en rhumatologie, en neurologie, en chirurgie ou en neuropsychiatrie.